

老舗の眼鏡メーカーが作った究極の放射線防護眼鏡

Xガードシリーズ

- *0.75mmPb以上の鉛ガラス
- *フィット感にこだわったフレーム
- *クリアな視界
- *グッドデザイン賞受賞



ゴーグル

X-GUARD for Goggles



アーマー

X-GUARD for Armor



モナーク

X-GUARD for Monarch



正面上下左右完全防護

- 独自のサイドアーマーには、0.75mmPb以上の鉛板を挿入し、サイドからの散乱線を効率的にカットします！
- さらにフロントフード部分にも同じ鉛板を使用しており、上下からの散乱線も確実に防護します。
- サイドパッドを頬に充てることで、重さを分散させます。
(サイドパッドとツルは顔に合わせて形状調整が可能です。)



届出番号:27B3X0001000040

度付対応可能

本体にインナーフレームを取り付け、快適な掛け心地のままご使用いただけます。
インナーフレームのみを変えることで本体は共有してご使用いただくこともできます。



紹介動画



GOOD DESIGN AWARD
2020年度受賞

製品名	エックスガード アーマー
鉛当量	0.75mmPb (サイドアーマー・フロントフード部分も含む)
重さ	150 g (本体)
重さ	2 g (インナーフレーム/レンズ無しの状態)



サファイヤブルー

イタリアンレッド

ガンメタリックグレイ

シャンパンピンク

■ アーマーの特徴



重量分散

サイドパッドで頬に重さを分散させることによって、長時間着用してもストレスを感じることなく作業を行う事が出来ます。
またサイドパッドとツルは顔の形によって微調整ができるので、よりフィットした状態でご着用いただけます。



完全防護

0.75mmPb以上の鉛板を上下のフード部分とサイドに入れる事によって、全方向からの散乱線を効果的にカットします。



抜群のフィット感

自身の頭部の形に調整する事で、頭部を包み込むようにホールドし、よりフィットした着用感でお使いいただけます。



心地よい掛け心地

フロントとテンプルとの繋ぎに遊びを持たす事でストレスフリーな掛け心地を実現しました。

メーカー紹介

SHOWA
—OPTICAL ROAD—



昭和光学株式会社は、昭和14年(1939年)創業の開発型レンズメーカーです。
X線防護用眼鏡の他にスポーツ用眼鏡、サングラスなど様々なレンズを製造、研究開発をしています。

現在は独自技術や関連産業とのネットワークで先進的な製品をご提供しており、
きめ細かなマーケティング活動に基づき、的確に市場ニーズに対応したメガネレンズをお届けするため
研究・開発から加工・出荷まで責任ある体制を整え高い評価を得ています。



広い視野

- 側面にもエックスガードレンズを使用しています。(0.75mmPb)
- メガネの上からでも掛けられるオーバーグラスタイプです。
- サイドもクリアで広い視野を確保します。

製品名	エックスガード ゴーグル
レンズサイズ	幅62mm 高さ43mm
フレームサイズ	幅155mm 奥行170mm
重量	115g
最大適応メガネサイズ	幅135mm レンズ幅60mm 高さ43mm
鉛当量	0.75mmPb



カーボンブラック



マットブラック



マットブラウン

届出番号:27B3X00010000038



簡単着脱

- レンズカーブが強く、眼全体を覆うデザインです。
- センターマグネットで着脱が簡単です。
- フロントが分離し、首からかけられます。
- レンズカーブの収差を打ち消す光学設計を採用しています。

製品名	エックスガード クリックモナーク
レンズサイズ	幅60mm 高さ40mm
レンズ設計	8カーブ ディセンダー設計
フレームサイズ	幅150mm 奥行200mm~220mm
重量	85g
鉛当量	0.75mmPb



マグネット



アジャスター




ブラック

届出番号:27B3X00010000039

■ レンズ性能



明るい視界

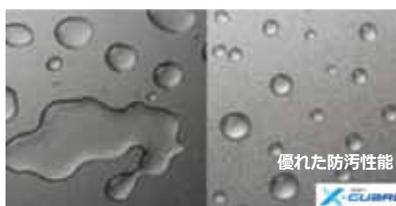

優れた防汚性能



優れた耐キズ性能

- レントゲン室に使用されている防護窓と同じ硝子を採用し、JIS61331-3で定められた、重装防護眼鏡の鉛等量(0.50mmPb以上/150kV)を確保しています。
- レンズコーティング技術により、透過率98%で一般的なメガネと同等の明るい視界を実現しました！さらに抜群の防汚・耐キズ性能を合わせもちます。

	アクリルハードコート	ガラスノンコート	エックスガード (透明鉛ガラス製)
透過率	89.3%	86.2%	98.0%
鉛筆強度	2H	8H	8H
耐表面摩耗性*1	1 往復で多数キズ	10往復で1本のキズ	16往復で1本のキズ
鉛当量*2	0.07mmPb	0.75mmPb	0.75mmPb以上

*1 スチールルール#0000/200g *2 カタログ値/当社調べ

販売元紹介



本社JPIヘルスケア社は、1980年の設立以来、X線関連の製品を製造し世界中で販売を行っています。また、JPIヘルスケア社の日本法人であるJpiジャパンは、顧客満足を第一に考え、X線グリッドをはじめ、放射線科に特化したユニークで魅力的な製品を取り扱っております。

その中でもお客様に一番身近で使用頻度が高い防護製品は、医療従事者を被ばくから守るだけではなく、掛け心地のよさ、高い防護性能、ファッション性を追求しております。

製品コード表

モデル名	色	コード一覧
アーマー	サファイヤブルー	SKXGASB
	イタリアンレッド	SKXGAIR
	ガンメタリックグレイ	SKXGAGM
	シャンパンピンク	SKXGACP
ゴーグル	マットブラック	SKXGGMBK
	カーボンブラック	SKXGGCBK
	マットブラウン	SKXGGMBR
クリックモナーク	ブラック	SKXGCMBK
【オプション】(アーマー向け)		
インナーフレーム(単焦点)	—	SKXGAIFSF
インナーフレーム(累進)	—	SKXGAIFPG
インナーフレーム(中近)	—	SKXGAIFMN
インナーフレーム(2重焦点)	—	SKXGAIFDF
超薄型オプション	—	SKXGAIFST



販売元

Jpiジャパン株式会社

〒124-0004 東京都葛飾区東堀切3-11-2 Jpi Gビル

Tel : 03-6686-7909 Fax : 03-6679-3281 Web : www.jpj-med.co.jp



製造元

昭和光学株式会社

〒577-0831 大阪府東大阪市俊徳町2-5-20

Tel : 06-6729-5881 Fax : 06-6727-0333 Web : <http://www.showa-opt.co.jp/>



MADE IN JAPAN